


ASTUCES POUR UN SOURIRE **BAGUÉ** «NICKEL» !

2
MIN

APRÈS CHAQUE REPAS


BROSSER **SÉPARÉMENT** LES DENTS DU **HAUT** DES DENTS DU **BAS**

Utiliser une brosse à dents qui facilite le brossage autour des appareils orthodontiques grâce à sa **coupe spécifique**

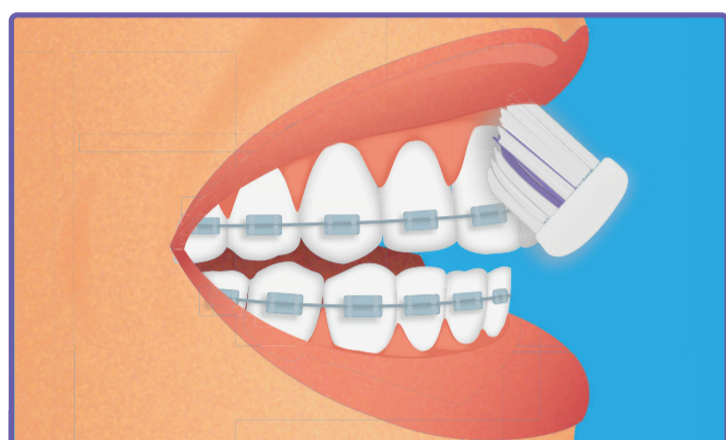

FACES **EXTERNES** (HAUT ET BAS)

Placer la brosse à **45°** entre la **gencive et les bagues** et effectuer des **mouvements circulaires** sur le **sillon gingival**.

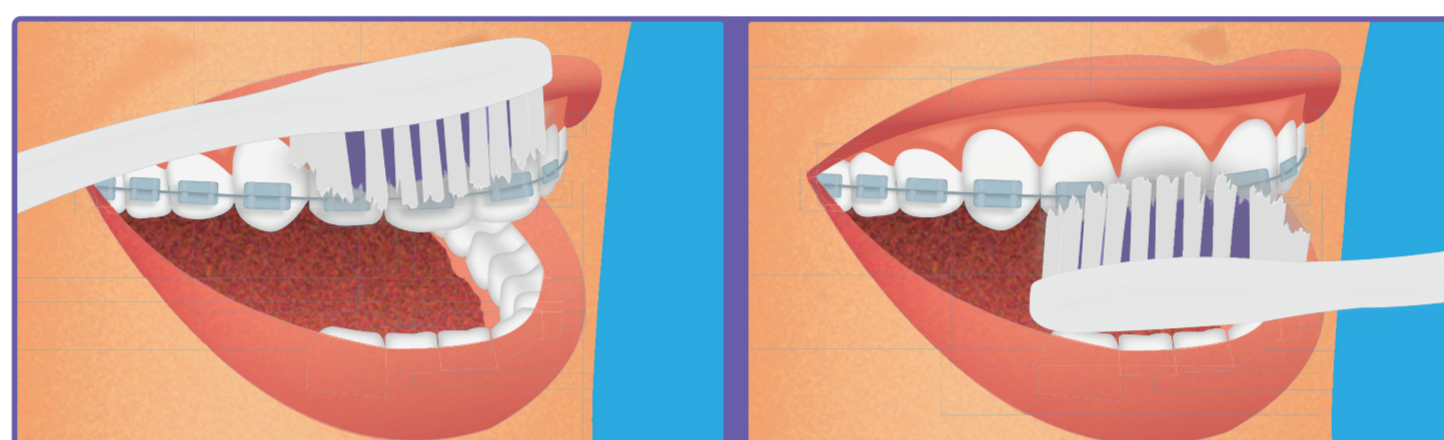


FACES **EXTERNES** (HAUT ET BAS)

Placer la brosse inclinée à **45° vers les bagues** et brosser en effectuant de **petits mouvements de gauche à droite** (au-dessus puis en-dessous des bagues).




FACES **EXTERNES** (HAUT ET BAS)

Placer la brosse sur les bagues et brosser **horizontalement**.

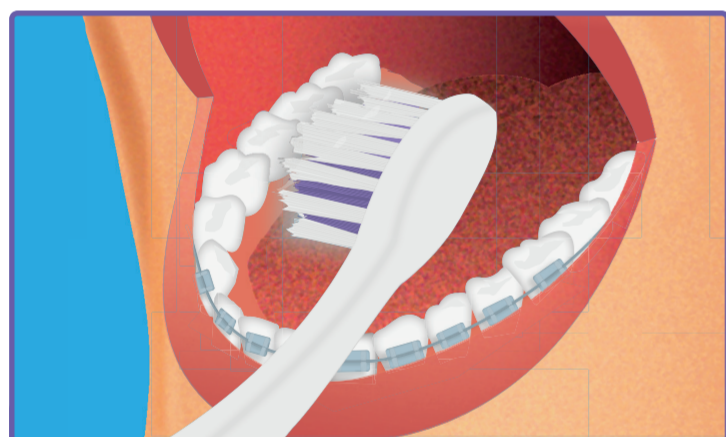


FACES **INTERNES** (HAUT ET BAS)

Brosser en effectuant des **mouvements de rouleau** allant de la **gencive vers la dent**, tout en maintenant l'angle à **45°**.

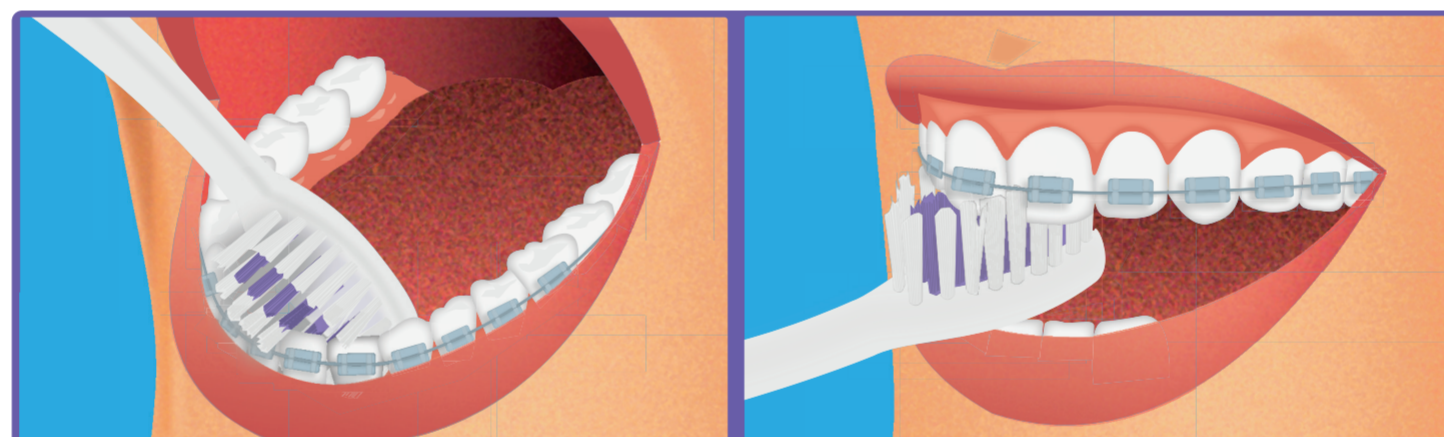


INCISIVES

Effectuer des **mouvements de va-et-vient** en utilisant l'**extrémité de la tête** de la brosse à dents.

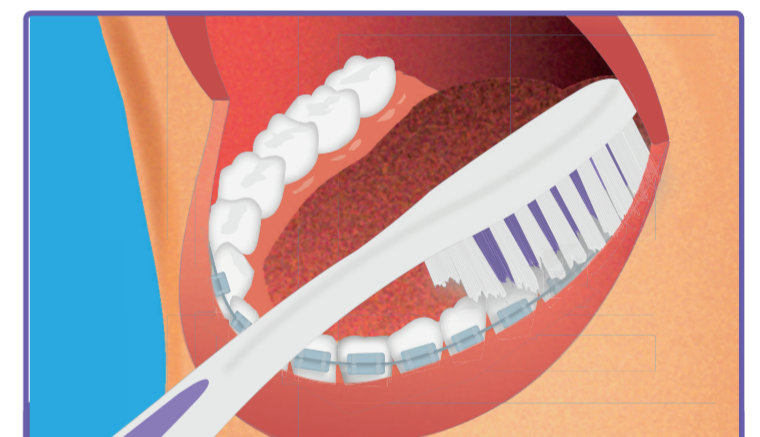


MOLAIRES

Brosser les **faces** des molaires en un **mouvement horizontal**.

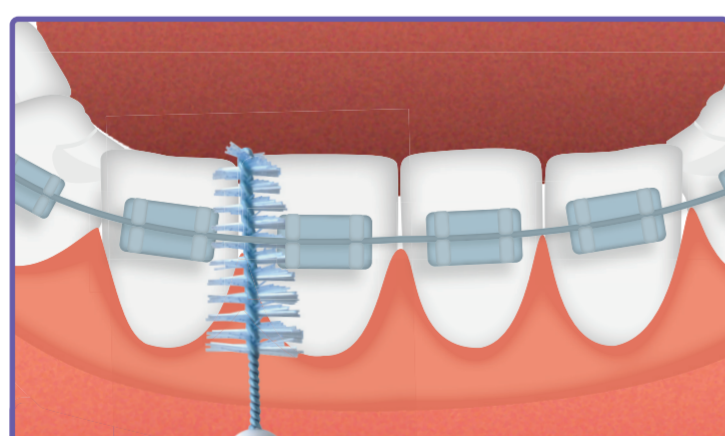


Compléter le brossage

par l'utilisation de **brossettes interdentaires** autour **des arcs et des brackets**, ainsi qu'**entre les dents** quand les espaces le permettent.

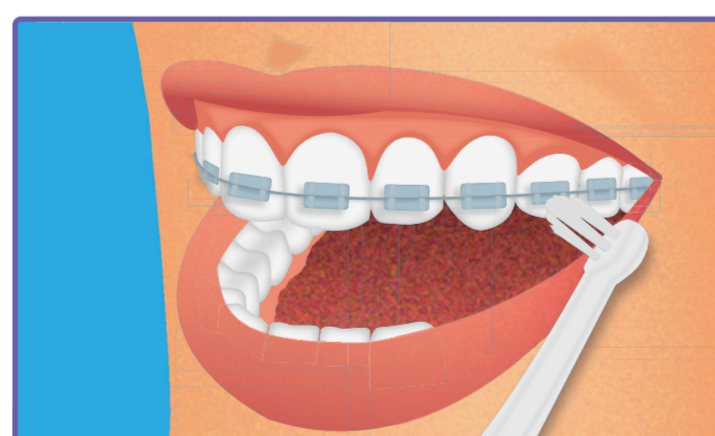

Pour les zones difficiles d'accès,


utiliser une brosse **monotouffe**.

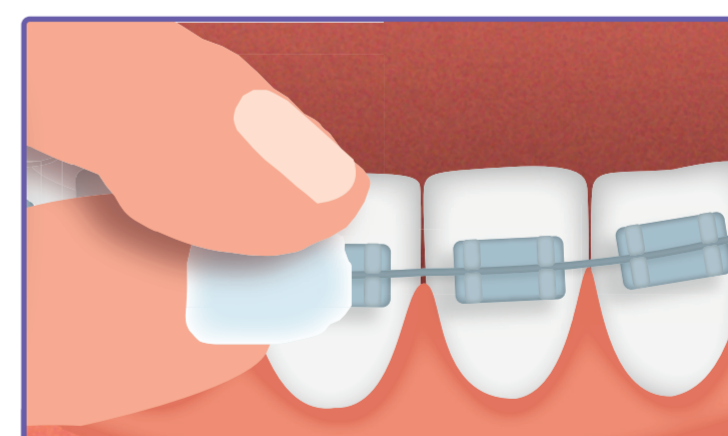

Protéger les muqueuses

en appliquant de la **cire transparente** sur l'appareil.

QUELQUES CONSEILS :

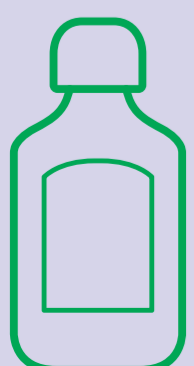

- AVANT TOUT BROSSAGE **ENLEVER** LES ÉLASTIQUES ET TOUT AUTRE ÉLÉMENT AMOVIBLE DE L'APPAREIL ORTHODONTIQUE.
- APRÈS LE BROSSAGE **RINCER VOTRE BOUCHE** AVEC UN BAIN DE BOUCHE APPROPRIÉ.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.SunstarGUM.fr